

## Portabel golvvåg för medicinskt bruk

Förenklat handhavande


BW-0520



## SPECIFIKATIONER

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>Modell</b>   | <b>BW-0520</b> |
| Max kapacitet   | 200 kg         |
| Avläsbarhet     | 50/100 g       |
| Noggrannhet     | OIML Klass III |
| Tara område     | -99.9kg        |
| Min. belastning | 1 kg           |

| Specifikationer                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Display                                 | 23 mm hög, 5 segment, LCD-display med bakgrundsbelysning |
| Konstruktion                            | Metallstruktur med ABS-platta                            |
| Vågplatta, storlek                      | 340 x 300 mm                                             |
| Höjd                                    | 70 mm                                                    |
| Stabiliserings tid, ca                  | 3 Sekunder standard                                      |
| Arbetstemperatur                        | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F                                |
| Strömförsörjning                        | 7,5V/0,1A AC adapter eller<br>Batterier 6xAA             |
| Eu-verifierad i enlighet med 2014/31/EU | Class III                                                |
| MDD-godkänd i enlighet med 93/42/EEC    | Class I                                                  |

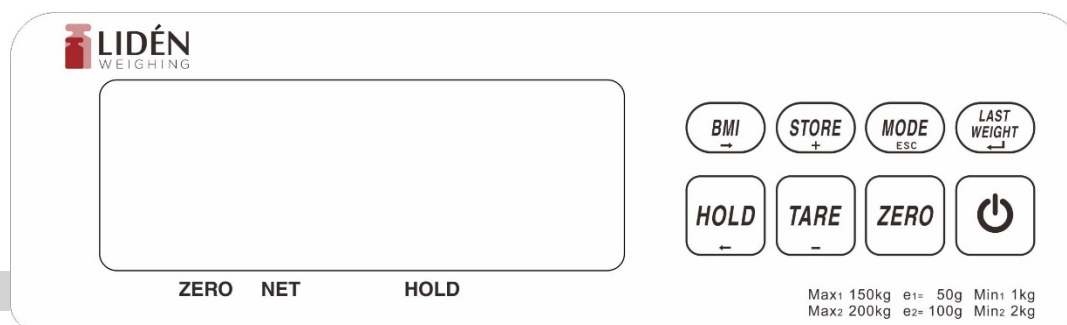

## Bakgrundsbelysning

1. Bakgrundsbelysning av: Tryck på  under 3 sekunder och displayen visar "OFF"
2. Bakgrundsbelysning på: Tryck på  under 3 sekunder och displayen visar "ON"  
Bakgrundsbelysningen är i detta läge på under belastning av vågen

## Knappfunktioner



### På / Av

Startar och stänger av vågen.

- a. Starta våg: snabbt tryck.
- b. Stäng av våg: håll inne knapp ca 2 sekunder.



### Holdfunktionen

Med nollställd våg: tryck på knapp och välj select Auto eller Manual Hold mode.

- a. Auto Hold mode:  
Vågen låser visat värde automatiskt när värdet är stabilt.
- b. Manual Hold mode:  
När vikten är stabil, tryck på knapp för att låsa värde.

Lås upp display genom att trycka på  Upprepa vid behov.



### Tara-funktion

Tryck på  med belastad vågplatta för att tarera display. Tryck på knappen ytterligare en gång med tom vågplatta för att återställa funktion.

## Förinställd tara

Håll in  under 3 sekunder. Knappa sedan in den kända taravikten och bekräfta med . Displayen visar ett negativt värde. Tryck på  eller  för att återställa funktionen.



## Nollställning

Tryck på denna knapp för att nollställa vågen och justera nollområdet. (<+/-2 %).



## Lagra viktvärde

Belasta vågen. När vågen är stabil tryck ned knappen i 3s. Displayen indikerar .

Använd   för att ange minnesposition (1-99).

Tryck på  för att återgå till vägningsfunktion eller vänta 10s för automatisk återgång.

Använd  för att nollställa minnesposition. Tryck på  för att återgå till vägningsfunktion.



## Body Mass Index

En person ställer sig på vågen. När vågen är stabil tryck ned knappen .

Använd knapparna     för att ställa in personens längd. Tryck på  för att visa BMI värde. BMI-värdet försvinner då personen lämnar vågen.

Tryck på  för att visa senaste vikt.

