

Portabel golvvåg för medicinskt bruk

Förenklat handhavande

BW-0520




www.liden.weighing.se

Specifikationer

Modell	BW-0520
Maxkapacitet	200 kg
Avläsbarhet	50/100 g
Noggrannhet	OIML Klass III
Tara område	-99 %
Min. belastning	1 kg



Display	23 mm hög, 5 segment, LCD-display med bakgrundsbelysning
Konstruktion	Metallstruktur med ABS-platta
Vågplattform, storlek	340 x 330 mm
Höjd	65 mm
Stabiliserings tid, ca	3 Sekunder standard
Arbetstemperatur	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Strömförsörjning	5V/1A AC adapter och 6xAA batterier
Eu-verifierad i enlighet med 2014/31/EU	Klass III
MDD-godkänd i enlighet med 93/42/EEC	Klass Im

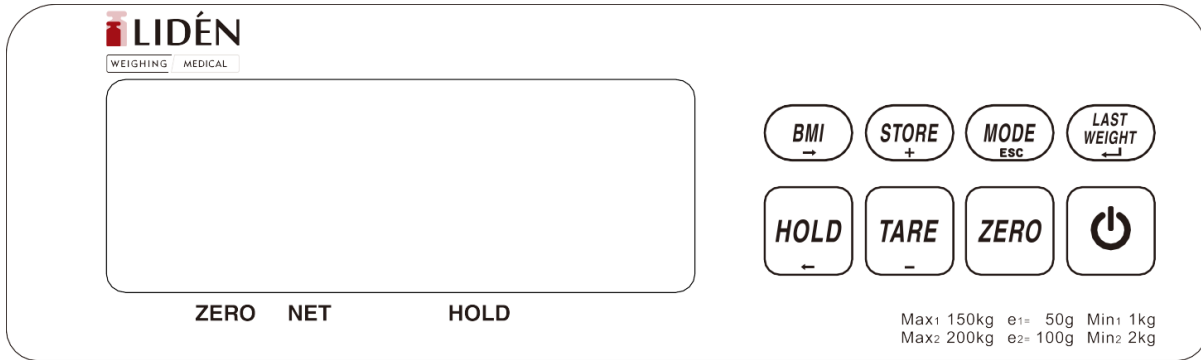Frontpanel



Handhavande & knappfunktioner

Bakgrundsbelysning

1. Bakgrundsbelysning av: Tryck på  under 3 sekunder och displayen visar "OFF"
 2. Bakgrundsbelysning på: Tryck på  under 3 sekunder och displayen visar "ON"
- Bakgrundsbelysningen är i detta läge på under belastning av vågen



På / Av

Startar och stänger av vågen.

- a. Starta våg: snabbt tryck.
- b. Stäng av våg: håll inne knapp ca 2 sekunder.

HOLD



Hold- funktion


Med nollställd våg: tryck på knapp och välj select Auto eller Manual Hold läge.

- a. Auto Hold:
Vågen låser visat värde automatiskt när värdet är stabilt.
- b. Manual Hold:
När vikten är stabil, tryck på knapp för att låsa värde.





Lås upp display genom att trycka på  Upprepa vid behov.

TARE
-

Tara-funktion

Tryck på  med belastad vågplattform för att tarera display. Tryck på knappen ytterligare en gång med tom vågplattform för att återställa funktion.

Förinställd tara

Håll in  under 3 sekunder. Knappa sedan in den kända taravikten och bekräfta med . Displayen visar ett negativt värde. Tryck på  eller  för att återställa funktionen.

ZERO


Nollställning

Tryck på denna knapp för att nollställa vågen och justera nollområdet. (<+/-2 %).

STORE
+

Lagra viktvärde

Belasta vågen. När vågen är stabil tryck ned knappen i 3s. Displayen indikerar . Använd   för att ange minnesposition (0-9).





Tryck på  för att återgå till vägningsfunktion eller vänta 10s för automatisk återgång.

Använd  för att nollställa minnesposition. Tryck på  för att återgå till vägningsfunktion.

BMI
-

Body Mass Index

En person ställer sig på vågen. När vågen är stabil tryck ned knappen 

Använd knapparna     för att ställa in personens längd. Tryck

på 


för att visa BMI värde. BMI-värdet försvinner då personen lämnar vågen.

Tryck på  för att visa senaste vikt.


Byte av batterier

OBS! Använd inte uppladdningsbara batterier. Om ni gör det så ska batterierna laddas i extern laddare. Vågens adapter kan inte ladda batterierna när de sitter i vågen.


1. Vänd på vågen och lossa de två skruvarna. Lägg indikatorn åt sidan.

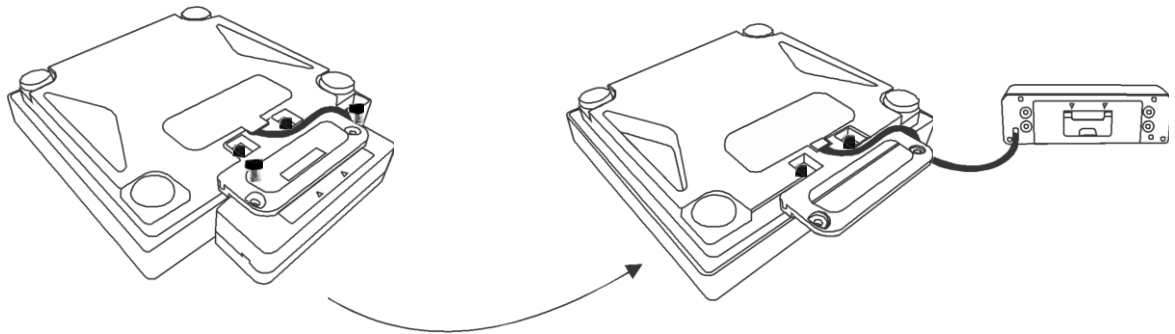

2. Öppna batteriluckan i riktning som pilen visar.

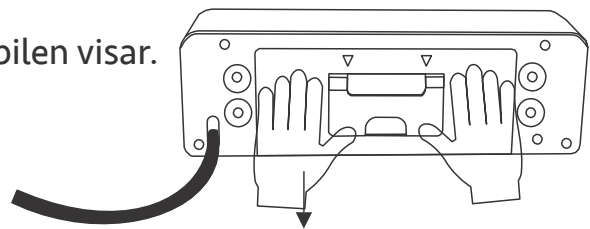

3. Sätt i batterierna och var noga med att polerna sitter rätt.

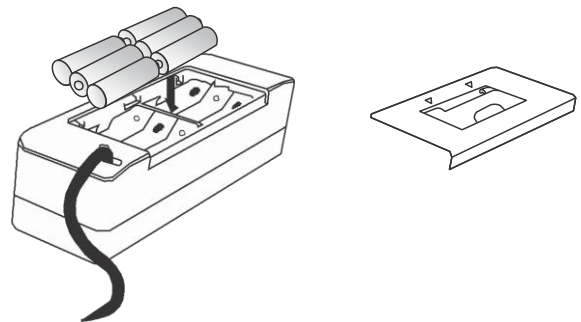

4. Stäng batteriluckan.

Rengöring

Innan rengöring. Var säker på att strömkontakten inte sitter i vägguttaget.

1. Vänligen använd inga stora mängder med vatten, då det kan skada vågens elektronik.
2. Rengör all extern yta enbart med en fuktad trasa.

Kontrollrutiner

Vågen är verifierad vid leverans, vågen ska omverifieras om plomberingen (SEAL) är bruten vid ex. reparation av vågen.

Alternativt om man misstänker att vågen visar fel.

Egna kontroller kan göras med känd vikt, men är inte nödvändiga. Kontakta din återförsäljare om du är osäker.