

Portabel golvvåg för medicinskt bruk

Förenklat handhavande

BW-0520




www.liden.weighing.com

SPECIFIKATIONER

Modell	BW-0520
Max kapacitet	200 kg
Avläsbarhet	50/100 g
Noggrannhet	OIML Klass III
Tara område	-99 %
Min. belastning	1 kg



Specifikationer	
Display	23 mm hög, 5 segment, LCD-display med bakgrundsbelysning
Konstruktion	Metallstruktur med ABS-platta
Vågplatta, storlek	340 x 330 mm
Höjd	65 mm
Stabiliserings tid, ca	3 Sekunder standard
Arbetstemperatur	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Strömförsörjning (option)	5V/1000 mA AC adapter eller Batterier 6xAA (ingår)
Eu-verifierad i enlighet med 2014/31/EU	Klass III
MDD-godkänd i enlighet med 93/42/EEC	Klass I

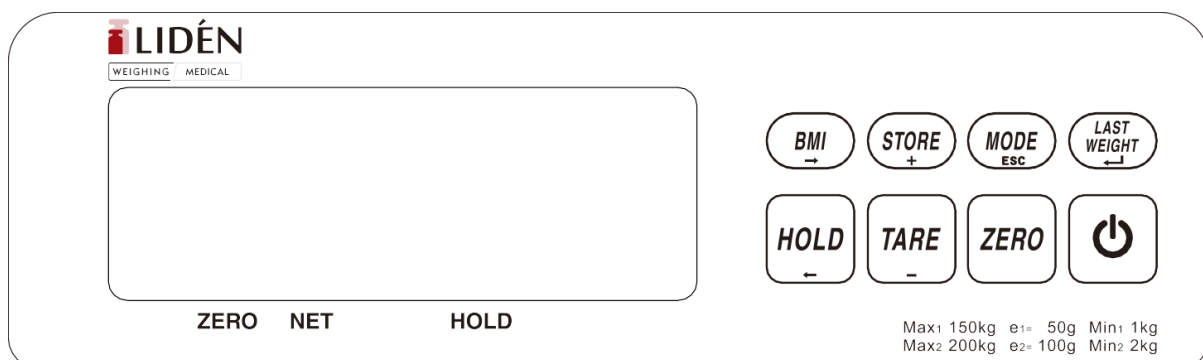Frontpanel



Handhavande

Bakgrundsbelysning

1. Bakgrundsbelysning av: Tryck på  under 3 sekunder och displayen visar "OFF"
2. Bakgrundsbelysning på: Tryck på  under 3 sekunder och displayen visar "ON"
Bakgrundsbelysningen är i detta läge på under belastning av vågen

Knappfunktioner



På / Av

Startar och stänger av vågen.

- a. Starta våg: snabbt tryck.
- b. Stäng av våg: håll inne knapp ca 2 sekunder.

HOLD



Hold- funktion

Med nollställd våg: tryck på knapp och välj select Auto eller Manual Hold mode.


- a. Auto Hold mode:
Vågen låser visat värde automatiskt när värdet är stabilt.
- b. Manual Hold mode:
När vikten är stabil, tryck på knapp för att låsa värde.

Lås upp display genom att trycka på  Upprepa vid behov.

TARE






Tara-funktion

Tryck på  med belastad vågplatta för att tarera display. Tryck på knappen ytterligare en gång med tom vågplatta för att återställa funktion.

Förinställd tara

Håll in  under 3 sekunder. Knappa sedan in den kända taravikten och bekräfta med

. Displayen visar ett negativt värde. Tryck på  eller  för att återställa funktionen.

ZERO



Nollställning


Tryck på denna knapp för att nollställa vågen och justera nollområdet. (<+/-2 %).



STORE
+

Lagra viktvärde

Belasta vågen. När vågen är stabil tryck ned knappen i 3s. Displayen indikerar **Sto00**.


Använd   för att ange minnesposition (1-99).






Tryck på  för att återgå till vägningsfunktion eller vänta 10s för automatisk återgång.


Använd  för att nollställa minnesposition. Tryck på  för att återgå till vägningsfunktion.

BMI
-

Body Mass Index

En person ställer sig på vågen. När vågen är stabil tryck ned knappen .


Använd knapparna     för att ställa in personens längd. Tryck på  för att visa BMI värde. BMI-värdet försvinner då personen lämnar vågen.

Tryck på  för att visa senaste vikt.


Byte av batterier:

OBS! Använd **inte** uppladdningsbara batterier. Om ni gör det så ska batterierna laddas i extern laddare. Vågens adapter kan inte ladda batterierna när de sitter i vågen.


1. Vänd på vågen och lossa de två skruvarna. Lägg indikatorn åt sidan.

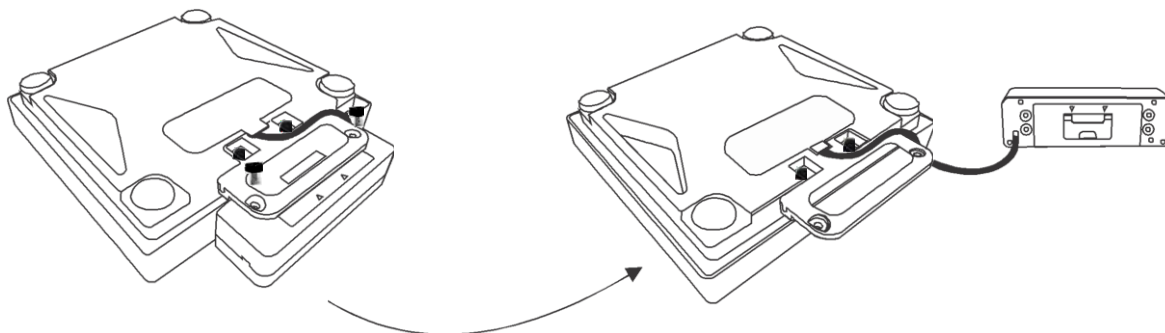

2. Öppna batteriluckan i riktning som pilen visar.

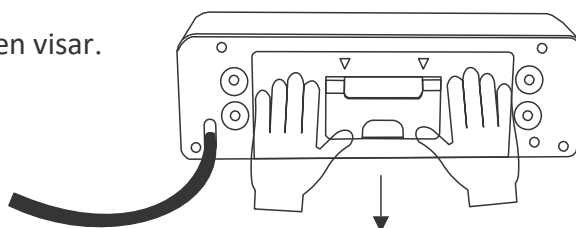

3. Sätt i batterierna och var noga med att polerna sitter rätt.

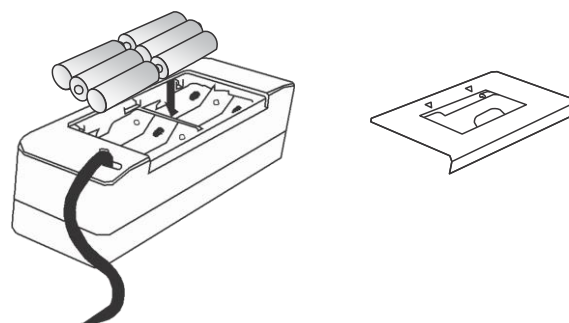

4. Stäng batteriluckan.

Rengöring:

Innan rengöring. Var säker på att strömkontakten inte sitter i vägguttaget.

1. Vänligen använd inga stora mängder med vatten, då det kan skada vågens elektronik.
2. Rengör all extern yta enbart med en fuktad trasa.