

Pelaryåg för medicinskt bruk
Förenklat handhavande

MBPB-250




www.liden-weighing.se

Specifikationer

Modell	MBPB-250M
Maxkapacitet	250 kg
Avläsbarhet	50/100 g
Noggrannhet	OIML Klass III
Taraområde	100 %
Min. belastning	1 kg

Display	25 mm hög, 5 segment, LCD-display med bakgrundsbelysning
Konstruktion	Metallkonstruktion
Produkt storlek	510 x 320 x 1035 mm
Plattform storlek	375 x 320 mm
Stabiliserings tid, ca	3 sekunder standard
Arbetstemperatur	0°C - 40°C
Strömförsörjning	12V1A AC adapter eller 6xAA batterier
EU-verifierad i enlighet med 2014/31/EU	Klass III
MDD-godkänd i enlighet med 93/42/EEC	Klass Im

Frontpanel - knappar och symboler

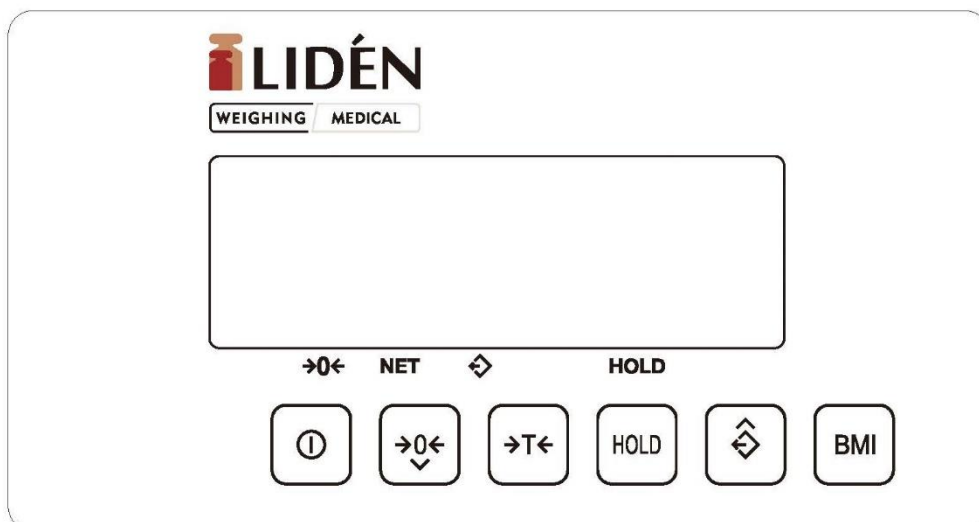

På / Av



Nollställningsknapp



Tareringsknapp



Holdfunktion



Hämta



BMI-funktion



Nollindikering



Nettoindikering/Vågen är i tarerat läge



Hämtat värde



Låst värde



Stabilt värde

Funktioner



På / Av

Tryck kort för att sätta i gång eller stänga av vågen.





Nollställningsknapp

Nollställer vågens display. Används vid obelastad våg.

→0← indikeras.





Tareringsknapp


Tareringsknappen används för att dra ifrån sådant som vägs tillsammans med patienten, (tex kläder, skor eller annat). Gör så här: placera kläder, skor eller annat på vågen. Tryck på  för att dra bort denna vikt, avlägsna kläder, skor eller annat. Displayen kommer att visa **NET**. Genomför vägningen av person. Tryck på  för att avsluta tarafunktionen.



Manuell eller automatisk holdfunktion

I nolläge kan man välja manuell eller automatisk holdfunktion genom att trycka på  i 3 sekunder. I displayen visas **Hold Auto** eller **Hold Off**.

Manuell hold: Ställ dig på vågen. Vänta på stabilt värde och tryck sedan på  för att låsa värdet. Personen kan nu lämna vågen.

Displayen återgår till noll efter ca en sekund. Värdet hämtas upp genom att trycka på  Hämta.





Automatisk hold:


Ställ dig på vågen. Vid stabil vikt kommer vågen automatiskt låsa värdet. Om vikten efter låsning förändras mer än 4 kg aktiveras vågen igen och kommer, när vågen är stabil, återigen att automatiskt låsa värdet.



BMI – Body Mass Index



Ställ en person på vågen och vänta tills vikten är stabil.

Tryck på  och använd sedan  för att minska eller  för att öka personens längd. Tryck sedan åter på  för att avsluta och visa uträknat BMI.

BMI-värdet försvinner när personen lämnar vågen men kan hämtas med  Displayen visar vikt, längd och BMI.

Byte av batterier

1. Koppla bort eventuell nätadapter från vågen.
2. Öppna batteriluckan på baksidan av indikatorn.
3. Sätt in 6 st. nya AA batterier och var noga med att +/- polerna sitter rätt.
4. Stäng batteriluckan.

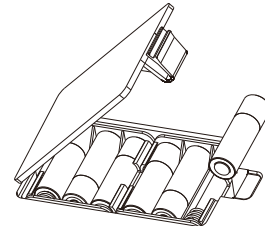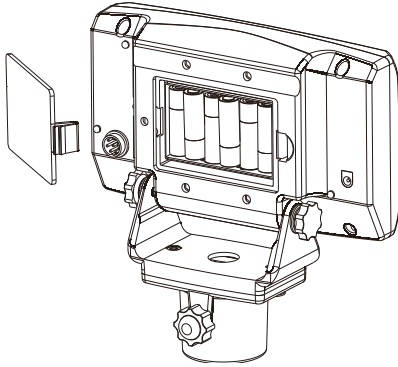

OBS! Om ni använder uppladdningsbara batterier så ska dessa laddas i extern laddare. Vågens adapter kan inte ladda batterierna när de sitter i vågen.

Rengöring/Desinficering

Vid allt underhållsarbete med vågen ska strömförsörjningen brytas.

Vågen får bara rengöras med hushållsrengöringsmedel eller desinficeringsmedel, ex. 70% isopropanol lösning.

Vi rekommenderar ett desinficeringsmedel som är avsett för rengöring genom våttorkning av vågens ytor. Följ tillverkarens anvisningar.

Använd inte poleringsmedel eller starka rengöringsmedel som tex bensin, eftersom de kan skada de ytor som är i plast eller gummi.

För att undvika korskontaminering rekommenderas följande desinficeringstillfällen:

- Före och efter varje direktkontakt med huden.
- Vågdisplay - vid behov.
- Ta omedelbart bort alla synliga föroreningar.

Spruta inte desinficeringsmedlet på vågdisplayen (med tryck)

Desinficeringsmedlet får inte tränga in i vågen.

Kontrollrutiner

Vågen är verifierad vid leverans, och ska omverifieras om plomberingen (SEAL) är bruten vid ex. reparation av vågen.

Alternativt om man misstänker att vågen visar fel.

Egna kontroller kan göras med känd vikt, men är inte nödvändiga.


Kontakta din återförsäljare om frågor uppstår.

Felkoder

Om vågen inte fungerar som den ska eller visar errorkoder vänligen kontakta din återförsäljare.


Montering

1. Rätta ut indikatorkabeln från vågplattformen.

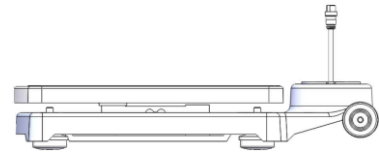

2. Trä kabeln igenom röret.


Se till att rørets ände inte kan klämmer kabeln.

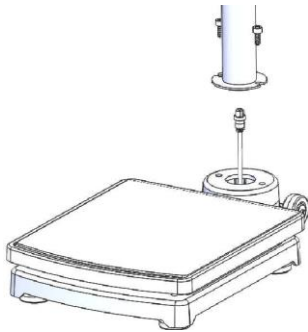

3. Dra åt de medföljande skruvarna, så röret sitter stadigt.

Trä på medföljande täcklock över röret.

4. Trä kabeln genom indikatorfästet, enligt bild.

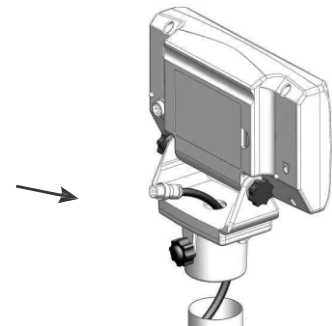


5. Montera indikatorfästet på röret och skruva åt fixeringsratten

Kabel




Fixeringsratt

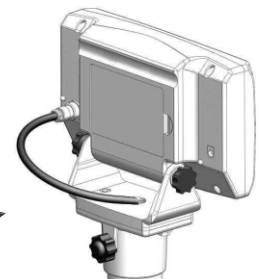

6. Anslut indikatorkabeln och skruva fast kontakten.

7. Se till att vågens vattenpass 'bubbla' är korrekt enligt bild.
Justeras vid behov med hjälp av vågfötterna.

Rätt

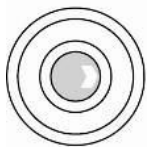

Fel

